

**OSOBNÍ
ZESILOVAČ
ZVUKU
MINI JH-A50**



Návod k použití
model JH-A50

Vážený zákazník, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

OBSAH BALENÍ / POPIS ČÁSTÍ



PROVOZ

KROK 1: INSTALACE BATERIE

1. Ujistěte se, že baterie je zinková baterie typ A10.
 2. Otevřete příhrádku na baterii.
 3. Umístěte baterii značkou "+" směrem vzhůru.
 4. Příhrádku na baterii uzavřete
- Poznámka: Před vložením baterie do zařízení se ujistěte, že jste sejmuli z baterie ochranný štítek.



KROK 2: UMÍSTĚNÍ ZESILOVAČE ZVUKU DO UCHA

1. Začněte tak, že nastavíte úroveň hlasitosti na nejnižší úroveň.
 2. Přesuňte vypínač ZAPNUTO (ON) / VYPNUTO (OFF) do polohy ZAPNUTO (ON).
 3. Až budete připraveni umístit zesilovač zvuku do ucha, držte ho v horní části (viz obrázek). Dbejte prosím na to, aby Vaše prsty nezakrývaly mikrofon, protože by to mohlo způsobit zpětnou vazbu.
 4. Opatrně nasadte zesilovač zvuku do ucha. (viz obrázek).
- Poznámka: Ujistěte se, že jste dosáhli pohodlného uchycení v uchu a že mikrofon není blokován. Ujistěte se, že přístroj pevně zapadl do ucha. V případě potřeby změňte velikost ušní koncovky.



KROK 3: NASTAVENÍ HLASITOSTI

Chcete-li upravit hlasitost, vyjměte zesilovač zvuku z ucha a nastavte požadovanou hlasitost otáčením tlačítka hlasitosti. Při jakékoliv změně úrovně hlasitosti vyjměte naslouchadlo z ucha!!!

KROK 4: PO POUŽITÍ

1. Chcete-li zesilovač vypnout, vyjměte jej z ucha a přesuňte vypínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ do polohy VYPNUTO (OFF).
- Při příštím zapnutí zesilovače zvuku bude nastavena poslední používaná hlasitost.
2. Umístěte jej do přenosného pouzdra.




VÝMĚNA UŠNÍCH KONCOVKY

Chcete-li vyměnit silikonové ušní koncovky, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Odstraňte současnou ušní koncovku:



2. Připojte novou ušní koncovku:

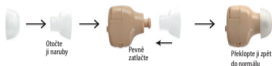

ČIŠTĚNÍ

Neponořujte žádné části do vody nebo jiné kapaliny.

1. Pomocí dodaného čistícího kartáče z mikrofonu odstraňte prach, ušní maz nebo nečistoty, které se mohly nashromáždit uvnitř.
2. Pomocí nástroje na čištění koncovek jemně odstraňte prach, ušní maz nebo nečistoty, které se mohly nashromáždit v otvoru ušní koncovky.
3. V případě potřeby otřete tělo zesilovače zvuku a koncovky vlhkým hadříkem.

Poznámka: Pokud zesilovač zvuku delší dobu nepoužíváte, vyndejte z něj baterii a umístěte ji do přenosného pouzdra. Uchovávejte na chladném a suchém místě.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

POKUD NESLYŠÍTE ZVUKY:

- Zkontrolujte, zda je tlačítko ZAPNUTO/VYPNUTO na pozici ZAPNUTO.
- Zkontrolujte, zda je nainstalována baterie.
- Pokud je baterie nainstalována, zkontrolujte, zda není vybitá
- Zkontrolujte, zda mikrofon nebo ušní koncovku něco neblokuje.

POKUD JE HLASITOST ZVUKU NÍZKÁ:

- Ujistěte se, že je zesilovač zvuku v uchu umístěn správně.
- Zkontrolujte polohu tlačítka hlasitosti a v případě potřeby zvýšte hlasitost.
- Nízká úroveň nabití baterie může ovlivnit hlasitost.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **NEROZEBÍREJTE ZESILOVAČ ZVUKU**
- **NEPONOŘUJTE ZESILOVAČ ZVUKU DO VODY**
- Nepoužívejte zesilovač zvuku na vysokou úroveň hlasitosti po dlouhou dobu, protože může dojít k poškození sluchu. Přestaňte zesilovač zvuku používat, pokud ucítíte bolest nebo se nebudete cítit pohodlně.
- Nepoužívejte zesilovač zvuku v horkém a vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte zesilovač zvuku v dešti, sprše nebo při plavání.
- Neponořujte zesilovač zvuku do vody.
- Pokud zesilovač zvuku nepoužíváte, uchovávejte jej na chladném a suchém místě uvnitř přenosného pouzdra.
- Udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat kvůli malým částem.
- Vyhněte se pádu zesilovače zvuku, aby nedošlo k jeho poškození nebo zkratu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: 1 ks baterie A10
Maximální výstup zvuku: _____ <120+3dB
Vysokofrekvenční průměr: _____ 105dB±4
Zisk zesilovače (max): _____ 32dB±5
Zisk referenčního testu: _____ 22±5dB
Vstupní šum: _____ ≤45dB
Rozsah frekvence _____ F1<400Hz, F2>3500Hz
Celkové deformace harmonické vlny: _____ ≤25%



Výrobce: Huizhou Jinghao Medical Technology Co., Ltd, Floor
6, Huicheng Industry Building, No. 9, Huileng Dong Er Road,
Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, China

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebené funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.